

# Sådan bruger du dit forstøverapparat


Et forstøverapparat forstøver flydende medicin, så du kan indånde den og få den dybt ned i lungeme. Tucker bruger sit forstøverapparat, når han er hjemme sammen med Sami. Husk at have en voksen til at hjælpe dig med at bruge og rengøre dit forstøverapparat.

## Klargøring

- 1** Stil kompressoren på et bord.



- 2** Sæt kompressoren i en stikkontakt.

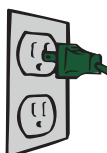

- 3** Sæt den ene ende af slangen til medicinbeholderen og den anden ende til kompressoren.




## Sådan tager du medicinen

- 4** Fyld medicinbeholderen med din medicin.




- 5** Tænd kompressoren, og kontrollér, at der kommer en støvsky ud af mundstykket.

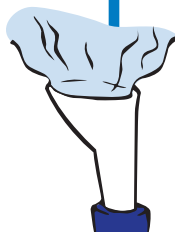

- 6** Sæt dig op. Tag mundstykket i munden, og træk langsomt vejret ind og ud. Når du bruger maske, kan du trække vejret på samme måde.




- 7** Når forstøveren begynder at lyde, som om den hoster, er behandlingen slut. Sluk kompressoren.

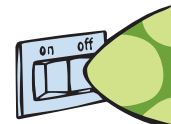


## Rengøring af kompressoren

- 1** Tag kompressoren ud af stikkontakten før rengøring.

- 2** Kontrollér filteret en gang om ugen, og udskift det, hvis det er snavset.

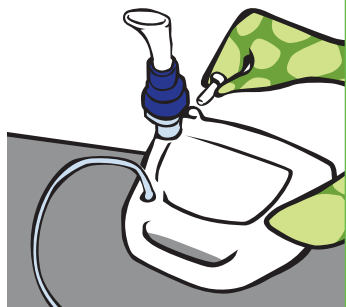


- 3** Tør kompressoren af udvendigt med en fugtig klud en gang om måneden.

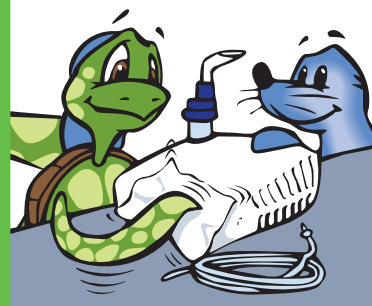

- 4** Opbevares et tørt og sikkert sted.

## Rengøring af forstøveren

- 1** Tag slangen af, og skil forstøversættet ad, hver gang du har brugt den.

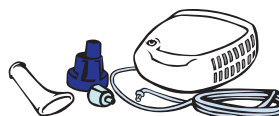

- 2** Vask forstøversættets dele i varmt sæbevand.

- 3** Skyl den med rent vand, og lad den lufttørre.

Hvis du har en et forstøversæt, der kan bruges igen (den lyseblå)

– En gang om ugen skal du koge alle dele (ikke slangen eller ansigtsmasken) i vand med 2-3 dråber opvaskemiddel i 10 minutter.



**Philips Healthcare er en del af  
Royal Philips**

**Kontakt os**

[www.philips.com/healthcare](http://www.philips.com/healthcare)  
[healthcare@philips.com](mailto:healthcare@philips.com)

**Asien**

+49 7031 463 2254

**Europa, Mellemøsten, Afrika**

+49 7031 463 2254

**Philips Danmark SRC**

-45 39771700

**Latinamerika**

+55 11 2125 0744

**Nordamerika**

+1 425 487 7000

+800 285 5585 (gratis, kun USA)

Respironics Respiratory Drug  
Delivery (UK) Ltd  
Chichester Business Park, City Fields Way  
Tangmere, Chichester PO20 2FT  
Storbritannien

**Kundeservice**

+1 724 387 4000

+800 345 6443 (gratisnummer, kun USA)

**Philips Respironics Asien og Stillehavet**

+65 6882 5282

**Philips Respironics Australien**

+61 (2) 9947 0440

+1300 766 488 (gratisnummer, kun  
Australien)

**Philips Respironics Kina**

+86 400 828 6665

+86 800 828 6665

**Philips Respironics Tyskland**

+49 8152 93 06 0

**Philips Respironics Frankrig**

+33 2 51 89 36 00

**Philips Respironics Italien**

+39 039 203 1

**Philips Respironics Sverige**

+46 8 120 45 900

**Philips Respironics Schweiz**

+41 6 27 45 17 50

**Philips Respironics Storbritannien**

+44 800 1300 845

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)

Respironics, Sami the Seal og Tucker the Turtle er varemærker  
tilhørende Koninklijke Philips N.V. og dennes datterselskaber.  
Alle rettigheder forbeholdes.



Se mere på [www.philips.com/asthma](http://www.philips.com/asthma)



© 2018 Koninklijke Philips N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Philips Healthcare forbeholder sig retten til at foretage ændringer i specifikationer og/eller  
ophøre et hvilket som helst produkt på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel eller forpligtelse  
og vil ikke have ansvaret for nogen følger på grund af anvendelsen af denne publikation.

KS 7/26/18 PN1552044